



MBD Healthcare Co., Ltd.

Head office : 340 Moo.6, Sanphisuea, Mueang, Chiangmai 50300 Thailand

Bangkok office : 288 Sukhumvit 93 Rd., Bangchak, Phraknong, Bangkok 10260 Thailand

Healthcare since 1999

Tel. +6653-240-640 e-mail : info@mbd-healthcare.com (www.mbd-healthcare.com)



ใบรายงานผลการตรวจสอบและบำรุงรักษา

เครื่อง :Patient Monitor โรงพยาบาล :

ยี่ห้อ : หน่วยงาน :

รุ่น : ครุภัณฑ์ :

S/N : วันที่ :

ตรวจสอบครั้งต่อไป :

ลำดับ	QUALITATIVE TEST ทดสอบคุณสมบัติ	Pass ผ่าน	Fail ไม่ผ่าน	None ไม่มี	COMMENTS ข้อเสนอแนะ
1	ตรวจสอบสภาพความสะอาดตัวเครื่อง, ตัวถัง, ฝาครอบ				
2	ตรวจสอบสภาพจุดต่อ, สายไฟ, ชุดชาร์จแบตเตอรี่				
3	ตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่				
4	ตรวจสอบสภาพพัดลมระบายความร้อน				
5	ตรวจสอบสภาพปุ่มควบคุม, สวิตช์, Keypad				
6	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์แสดงผล, จอภาพ, มอนิเตอร์				
7	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ระบบล็อก, ข้อต่อ				
8	ตรวจสอบสภาพระบบแจ้งเตือน (Alarm)				
9	ตรวจสอบสภาพสัญญาณเสียง				
10	ตรวจสอบสภาพป้ายกำกับเครื่อง				
11	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ประกอบต่างๆ				
12	ตรวจสอบการทำงานของ NIBP				
13	ตรวจสอบการทำงานของ Spo2				
14	ตรวจสอบการทำงานของ EKG				
15	ตรวจสอบการทำงานของ TEMP				
16	ตรวจสอบการทำงานของ Co2				
17	ตรวจสอบการทำงานของ IBP				
18	ตรวจสอบระบบทดสอบโดยผู้ใช้(Self Test)				

หมายเหตุ :

STATUS/สรุปผลสถานะ

☐

Pass/ผ่าน

☐

Fail/ไม่ผ่าน

☐

Service/ต้องดำเนินการซ่อม

ผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

วันที่

FM-MN-09 : Rev 00 : 01/07/2568

☒ สำนักงานเชียงใหม่ : 340 หมู่ 6 ถ.สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053-240-640-1, 081-980-0404

☐ สำนักงานกรุงเทพฯ : 288 ซอยพื้งมี 21 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทร. 02-742-6759, 093-134-9988